



### **IPL LUZ PULSADA INTENSA**

La luz penetra en la dermis y es absorbida por la melanina en el vello y folículo piloso, produciendo un efecto fototérmico la potencia absorbida aumenta la temperatura de la melanina y la destruye sesión a sesión.

### **CARACTERISTICAS**

Diseño cómodo, pequeño y portátil

Tecnología de IPL (Luz Pulsada Intensa)

50.000 disparos de duración de la lámpara

Equipo seguro y fácil de operar

Depilación indolora y permanente para eliminar el vello no deseado

### **ESPECIFICACIONES**

Entrada de energía: 36W

Fuente de alimentación: 100V-240V

Frecuencia: 50Hz / 60Hz

Temperatura: 0 grados a 45 grados

Temperatura de trabajo: 5 grados a 35 grados

Rango de pulso IPL:> 510 nm

### **RESULTADOS**

Resultados clínicamente probados y 100% satisfactorios en general. Reducción significativa del vello en un 90% después de 7-10 sesiones. Precaución ¡ la mayoría de las personas pueden experimentar una sensación de calentamiento durante el uso.

### **¿Dónde se puede utilizar?**

En cualquier zona donde resida vello: bigote, axila, brazos, piernas, como la línea del cabello en la frente, el área del bikini en cualquier área menos en los ojos de forma directa

### **¿Cuánto tiempo debe de pasar entre sesiones?**

En las primeras 3 -5 sesiones realice una operación cada 15 días, en las siguientes 6 -8 sesiones, realice una operación cada mes. Como mantenimiento realice una operación cada 2-3 meses para las zonas con poco vello.

### **PRECAUCIONES**



- 1) Evite que la luz entre en contacto directamente con los ojos, trate de usar lentes protectores, la luz no debe de ser disparada directamente hacia los ojos.
- 2) Durante el tratamiento la piel debe estar limpia, de preferencia libre de cualquier cosmético, el equipo está diseñado para ser usado sin gel ya que las partes pueden ser dañadas
- 3) Para el filtro VERDE, por favor realice una prueba en alguna zona antes del uso, algunas personas pueden presentar fotosensibilidad si esto pasa por favor detenga la operación. Durante la operación, es normal que la piel se vuelva ligeramente roja. Puede usar hielo para que la piel vuelva a su estado normal.
- 4) Ajuste la potencia de menor a mayor. No aplique en heridas, a mayor potencia el resultado será mayor, por favor cuide la sensibilidad de su cliente
- 5) El resultado se retrasa en pieles oscuras, Por lo tanto no eleve el nivel la potencia para las pieles oscuras.
- 6) Hidrate la piel, ponga loción para después de asolearse y filtro solar
- 7) El equipo no es a prueba de agua, así que por favor no lo use en la bañera, ducha o cualquier otro lugar donde le caiga agua, puede electrocutarse si se sumerge.
- 8) En caso de daño a el cristal de la lámpara no lo use puede cortarse
- 9) En caso de que el equipo se moje, regréselo a la fábrica para determinar si se puede reparar, en caso de que este sumergido, no lo toque, primero desconéctelo por su seguridad.
- 10) Evite lugares donde hay fuertes campos magnéticos o choques eléctricos, no guarde el equipo en zonas de excesiva humedad y polvo como el baño o la cocina o lugares de alta temperatura
- 11) Para limpiar, no use un paño húmedo o líquidos ya que estos pueden dañar el equipo, use un paño suave y seco
- 12) Limpie la ventana del cabezal justo después de su uso. Con algodón y alcohol en aerosol para limpiar y esterilizar la ventana del cabezal de limpieza.No rocíe alcohol en la ventana del cabezal directamente.

### **Preguntas frecuentes**

1. ¿la función de IPL se puede utilizar en la cara, cabeza o cuello?

No es recomendado para los sitios faciales y debajo del cuello; Puede ser usado en las piernas, axilas, línea del bikini, espalda, pecho, estómago, brazos, manos o pies. Pero no en cara, cabeza o cuello.

2. ¿Realmente el dispositivo de depilación IPL funciona ?

Absolutamente. El dispositivo IPL esta diseñado para deshacer el crecimiento del bello en la piel, para siempre.

3. ¿Cuándo comenzaré a ver resultados?

Usted verá los resultados inmediatamente visibles, además, usted comenzará a ver resultados después de su tercera operación y el vello desaparecerá después de las diez.



4. ¿Cómo puedo acelerar los resultados?

Puede hacer dos operaciones al mes durante los tres primeros meses, después de eso haga una sesión al mes durante cuatro o cinco meses para eliminar completamente el vello.

5. ¿Puede usarse en Hombres?

¡Claro! Ya hemos recibido muchas clientes masculinos, el equipo es efectivo tanto en hombres como en mujeres.

6. ¿Duele?

La sensación varia de persona a persona, pero la mayoría de la gente lo define como una ligera presión en la piel, definitivamente duele menos que la depilación con cera, recuerde usar bajos niveles de potencia al iniciar el tratamiento.

7. ¿Necesito preparar la piel antes del tratamiento?

Sí. Comience con rápido afeitado de la zona la piel debe de estar limpia de otros productos, no use Gel de ultrasonido.

8. ¿Me volverá a crecer el vello?

Si, en las primeras sesiones, sin embargo sesión a sesión vera el vello mas delgado y fino, si deja el tratamiento el vello volverá a su patrón anterior.

9. ¿Puedo usarlo todos los días?

No se recomienda el uso diario. La regeneración del cabello no será suficiente para una operación exitosa (longitud mínima de 1 mm) . Es mejor esperar por lo menos 1 mm de la regeneración del vello antes de la siguiente sesión.

10. ¿Es la IPL probable que conduzca a una depilación permanente?

Solo la electrolisis depilara de forma permanente, sin embargo vera una marcada reducción del vello usando el IPL .

11. ¿Hay efectos secundarios como golpes, espinillas y enrojecimiento?

No se ha descubierto aun ningún efecto secundario en la piel, sin embargo, algunas personas pueden presentar hipersensibilidad o enrojecimiento temporal después de una sesión, aplique loción para después de asolearse y cuando la piel se enfrié la sentirá hidratada y suave.

