



4 EN 1 CAVITACIÓN ULTRASONICA + RADIOFRECUENCIA + ELECTROPORACION + INFRARROJO

FUNCIÓN CAVITACIÓN

Las vibraciones físicas de hasta 1 millón por segundo harán que las capas más profundas de la piel vibren por consecuencia, proporcionando una vibración celular única, aumentando la vitalidad de las células, promoviendo la circulación sanguínea, mejorando la nutrición de los tejidos de la piel y manteniendo el piel rosada y elástica.

La onda ultrasónica romper la masa grasa y la linfa disipa las toxinas, el efecto térmico de la onda ultrasónica puede hacer que cambie la función vascular y el proceso metabólico en un intento por impulsar la circulación de la sangre, reducir la excitación de la célula e imponer un efecto analgésico; la onda ultrasónica tiene un efecto de mejorar la catálisis y acelerar el metabolismo, puede hacer que el PH cambie hacia la dirección alcalina, facilitar la penetración de algún fármaco y mejorar la capacidad bactericida.

FUNCION RF RADIO FRECUENCIA

Cuando en manipulo entra en contacto con la piel puede enviar radiofrecuencia de 6 millones de vibraciones de energía térmica por segundo; Generada a partir de impulsos de alta frecuencia 500kHz se reducirá colágeno y alcanzara el efecto de estiramiento de la piel, mejorando las arrugas y la reducción de peso a través de la regeneración continua, el dispositivo está provisto de cuatro niveles de la función de RF que va de fuerte a débil, permite a los usuarios ajustar el nivel de acuerdo con su criterio.

FUNCIÓN LED

Luz roja con la onda 625nm de longitud cuenta con fuerza, alta pureza y densidad de energía uniforme, lo que tiene un efecto significativo en cuidado de la piel y la salud la energía infrarroja puede mejorar la vitalidad de las células, promover el metabolismo, promover la liberación de una gran cantidad de colágeno en la piel y tejido fibroso. Aplicable a diversos tipos de piel, la luz roja puede promover la circulación sanguínea y reactivar el colágeno para mantener su piel más suave y mejorar la sequedad de la piel y aliviar la pérdida de cabello, folículos dañados y alopecia.

CARACTERÍSTICAS DE EL EQUIPO

1 Tres funciones como Cavitación ultrasónica, RF (radiofrecuencia) y el LED (cromoterapia) se pueden utilizar por separado y en combinación RF + LED. RF + CAVITACIÓN. CAVITACIÓN + LED. LED + cavitación + RF.

2 El dispositivo es aplicable para las siguientes partes: brazo, vientre, pierna interior y exterior, espalda, cintura, cadera, pantorrilla no existe contraindicación con otras áreas del cuerpo

3 El dispositivo no es aplicable para las siguientes partes: cuello, parte clavicular, codo, muñeca, articulaciones, rodilla, tobillo, cerebro posterior, vértebra cervical y el pie etc.

4 Control sobre los tiempos y la duración del tratamiento reductivo

a. EL dispositivo tiene un rango de función y tamaño similar al tamaño carta A4

b. La operación en cada parte es de 10 minutos, puede operar 3 áreas del cuerpo al día, con un total de 30 minutos al día, una operación cada tres días.

c El funcionamiento de este dispositivo necesita ser trabajado con gel de adelgazamiento especial para ultrasonido, aceites o gel libre de grasa para lograr un efecto óptimo de pérdida de grasa, al terminar es necesario para limpiar y aplicar con una loción corporal reductiva y dejar reposar 30 min. (elvoltura corporal), Además de hacer un drenaje linfático por zona en cada sesión.

5 Es mejor utilizar el dispositivo después de tomar un baño.

6 El dispositivo se mantendrá en posición vertical en la parte frontal de el dispositivo como se muestra en la foto con cinco dedos agarrandolo firmemente



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO

PRINCIPALES FUNCIONES

1. Eliminación de grasa.
2. Anti-envejecimiento y eliminación de cicatrices.
3. Desintoxicación.
4. Elimina la fatiga, mejorar el sueño y relaja.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Nombre: RF radiofrecuencia , Cavitación ultrasónica

Voltaje de entrada: 100-240V

Voltaje de salida: DC 12V 400mA

Potencia: 20W



APARATOLOGIA
ESTÉTICA • MÉXICO