



CORRIENTE GALVANICA

INTRODUCCIÓN

Este dispositivo emplea Iontoforesis negativos y iones positivos, tiene dos cabezales desmontables para el tratamiento de superficies planas o curvas. El cabezal de rodillo es especialmente para trabajar con sustancias líquidas, genera estiramiento y fomenta la hidratación de la piel y la penetración de sustancias mediante una carga eléctrica de iones positivos o negativos, permite la entrada de nutrientes en la piel, aumenta la producción de colágeno y combate las arrugas. El uso de corriente galvánica permite drenar todas las toxinas e impurezas de la piel y los poros de manera profunda, es un medio eficaz para prevenir el acné y evitar las manchas en la piel, en resumen, La iontoforesis es una de las mejores maneras de infundir nutrientes en la piel utilizando productos de cuidado de la piel.

¿QUÉ ES LA CORRIENTE GALVANICA?

Si es Galvánico es también conocido como iontoforesis. Con una carga "-" y "+" y gel adecuado, usted será capaz de lograr un excelente resultado de absorción de nutrientes en la piel además de alisamiento y estiramiento inmediato. El Sistema galvánico da a la piel un brillo radiante y saludable debido a las suaves corrientes eléctricas de bajo nivel de galvanizado y sustancias especialmente formuladas para ser cargadas eléctricamente.

Cargas Negativas:

Use cosméticos para cargar de forma negativa durante el tratamiento, esto hará que los elementos tensio-activos suaves permitan purificar la piel. Como ya sabemos, las cargas iguales se repelen entre sí. Por lo tanto, ya que las cargas negativas se repelen entre sí, la carga negativa galvánica ayudará a liberar células muertas y las impurezas en la piel.

Cargas Positivas:

Use tónicos cosméticos para el tratamiento de manera positiva. Durante el ciclo de tratamiento, el Instrumento galvánico también estará cargado positivamente. Las cargas positivas se repelen entre sí de nuevo, ayudando a entregar los ingredientes beneficiosos, incluyendo el magnesio, aspartamo, y la arginina, en la piel. Elimine de cualquier exceso de producto en la piel y verá los resultados, dejará la piel fresca y radiante.

¿Por qué debemos utilizar el equipo galvánico-iontoforesis?

En el método de administración convencional simplemente aplicando los principios activos de los cosméticos en la piel, es difícil que los ingredientes penetren profundamente en la piel y ejerzan plenamente su efecto de embellecimiento y protección de la piel.

Esto es así porque los valores de balance hidrófila y lipófila de los ingredientes son inadecuados y los ingredientes activos inestables y sujetos a descomposición oxidativa.

La iontoforesis es un método para penetrar profundamente un disolvente ionizado en la piel pasando corriente débil a través de la piel. La iontoforesis ayuda a lograr un alto nivel de penetración de los ingredientes activos como por ejemplo la vitamina C, es el tratamiento más común hoy en día.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje: 110V

Cuenta con batería de litio recargable, puede utilizar fácilmente en casa o durante viajes.

Frecuencia: 50-60Hz

Galvánico (nivel de potencia): 0,05 mA - 1,0 mA (ajustable)

Color: blanco de plata

REGLAS PARA IONTOFORESIS PENETRACIÓN GALVÁNICA Y PROVITAMINA C ARRUGAS O LINEAS DE EXPRESION

A) La cantidad suficiente de vitamina C se debe suministrar a la capa basal de la epidermis para suprimir aumento anormal de melanina que causa la pigmentación tales como cloasma, pecas, y la pigmentación transitoria (después de la irradiación láser) para decolorar la melanina y ya existente.

B) Para suministrar prolina / lycine en cadenas alfa forme una triple hélice mediante la polimerización de 3 piezas de precollagen en cadenas alfa con respecto dermis de fibroblastos. Es significativo para proporcionar vitamina C intencionalmente como un cofactor esencial para hacer la función propil-4-hidroxilasa como una enzima principal para catalizar

C) La eliminación de oxígeno activo por intracelular y las cargas administradas de vitamina C previenen que onda UVA cause daños en el ADN, tales como 8-OHdG.

D) La Provitamina C previene el envejecimiento cutáneo en el nivel del ADN, extiende significativamente la vida celular mediante la prevención y cuidado de los telómeros de ADN situados en ambos extremos de los cromosomas de acortamiento.

E) Previene la hiperoxidación de sebo tales como escualeno y ceramida que tienen un efecto perjudicial sobre la piel. La Provitamina C previene la muerte celular causada por lipoperóxidos.

Nota: Nuestro nuevo dispositivo puede ayudarle a cerrar los poros y alisar arrugas, después de lavarse todos los días pase la corriente galvánica vera que su piel cobra mas tono solamente ionizando el agua de su rostro

